

II. W przypadku już istniejących stanów zapalnych:

1. Zastosuj znieczulenie miejscowe.
2. Wykonaj zabieg usunięcia wszystkich martwych tkanek.
3. Przepłucz roztworem soli fizjologicznej.
4. Wywołaj krwawienie i poczekaj, aż kieszonka wypełni się krwią.
5. Wypełnij zębodół preparatem Alveolex, a następnie zszyj.

Unikaj obecności ciał obcych i martwych tkanek w kieszonce przed zastosowaniem preparatu Alveolex.

Używaj produkt zgodnie z obowiązującym prawem.


W przypadku, gdy pacjent cierpi na nadwrażliwość na którykolwiek składnik produktu, nie powinno się go stosować.

Nie należy stosować materiału po upływie terminu ważności.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego stosowania lub stosowanie niezgodnie z przeznaczeniem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Do użytku tylko w gabinecie dentystycznym.

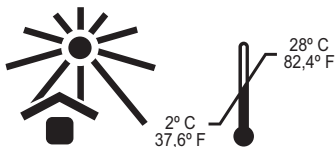

BIODINÂMICA QUÍMICA E FARMACÊUTICA LTDA.

CNPJ: 84.833.888/0001-33 - Indústria Brasileira
R. Ronat Walter Sodré, 4350 Parque Industrial IV
86200-000 Ibiporã - Paraná - Brasil
Fone +55 (43) 3178-7000 Fax + 55 (43) 3178-7099
www.biodinamica.com.br
Resp. Téc.: Edilson Irineu Sanches Calvo
CRO/PR 9713



ALVEOLEX

Opatrunek dziąsłowy na bazie propolisu



Opakowanie:

2x strzykawka 3g + 3 końcówki aplikacyjne

Skład:

Propolis(10%), Jodoform(5%), wosk pszczeni, substancje zagęszczające.

Alveolex: preparat stanowi fizyczną barierę ochronną po ekstrakcji zęba, pozwalającą na regenerację tkanki ,przy jednoczesnym uniknięciu zanieczyszczenia ścian zębodołu.

Aplikacja jest bardzo prosta, a konsystencja pasty pozwala preparatowi pozostać w kontakcie ze ścianami zębodołu przez dłuższy okres czasu. Po umieszczeniu nie wymaga żadnej specjalnej uwagi lekarza, poza obserwacją procesu gojenia. W ciągu 30 dni Alveolex będzie stopniowo usuwany, wraz z postępującym procesem gojenia. Obecność propolisu w składzie pomaga w regeneracji i procesie leczenia, a także działa przeciwbólowo, zapewniając pacjentowi łagodniejszy okres pooperacyjny. Zawarty w preparacie jodoform wspomaga i uzupełnia jego działanie, zwiększając wzrost komórek, poza tym posiada również działanie antyseptyczne. Materiał nie zawiera w składzie eugenolu, dzięki czemu jest bezpieczny dla tkanki dziąsła.

Wskazania:

- Skuteczny w zapobieganiu stanom zapalnym zębodołu.
- Wspomaga gojenie po ekstrakcji zębów.
- Redukuje ból pooperacyjny .
- W leczeniu stanu zapalnego zębodołu.
- Wspomagająco w procesie gojenia po ekstrakcji zęba u pacjentów chorych na cukrzycę.

Instrukcja użycia:

I. W zapobieganiu stanom zapalnym zębodołu i wspomaganiu gojenia:

1. Po ekstrakcji zęba, wypełnij zębodół preparatem Alveolex, a następnie zszyj.