

# CAPO BULK FILL

## Instrukcja użycia

Capo Bulk Fill to półpłynny, światłoutwardzalny kompozyt, wysoce widoczny na RTG (210% Al.). Stworzony do wypełnień w zębach trzonowych jako podkład i dla wypełnień typu „bulk”

### Skład:

modyfikowane uretanem żywice metakrylanowe, dimetakrylan butanediolu 77% wypełniacza szklanego, krzemionka pirogeniczna.

### Wskazania:

- wypełnienia grubych warstw do 4 mm w ubytkach klasy I i II
- podkład typu „base” ubytków klas I i II
- uszczelniający podkład typu „liner” w ubytkach klasy I i III

### Interakcje z innymi substancjami:

Należy unikać podkładów, materiałów zawierających eugenol

### Instrukcja stosowania:

1. Opracowanie ubytku.

Przygotuj ubytek używając techniki jak najmniej inwazyjnej. Wszystkie brzegi szklivi w zębach przednich powinny być ścięte. Nie ścinaj brzegów w odcinku tylnym, opłucz ubytek sprayem i osusz. Zaleca się używanie koferdamu.

2. Aproksymalne powierzchnie styczne.

Dla ubytków z aproksymalną powierzchnią styczną zastosuj transparentną matrycę.

3. Wytrawianie

Wytraw powierzchnię np. Capo Etch zaczynając od brzegów szklivi, pozostawiając wytrawiacz na około 15 sek., następnie opłucz delikatnie osusz.

4. Zastosuj system wiążący zgodnie z instrukcją producenta, np. Capo Bond.

5. Aplikacja Capo Bulk Fill

Zaaplikuj warstwę do 4mm Capo Bulk Fill do ubytku. Końcówki dla prawidłowej higieny powinny być stosowane jednorazowo do każdej aplikacji. Utwardzaj każdą warstwę 40 sek. lampą halogenową lub 20 sek. lampą diodową.

Podczas polimeryzacji tworzy się na powierzchni materiału warstwa dyspersyjna. Nie należy jej usuwać, gdyż tworzy wiązanie z warstwą kompozytu, który zostanie później użyty.

Alternatywnie Capo Bulk Fill może być użyty jako cienka warstwa tworząc zabezpieczenie dla odsłoniętej zębiny.

6. Capo Bulk Fill można polerować gumkami z nasypem diamentowym, dyskami różnego rodzaju, gumkami silikonowymi lub szczoteczkami do polerowania końcowego.

### Przeciwwskazania:

Niespolimeryzowany kompozyt może wywoływać alergię skórne. Należy używać rękawiczek.

Nie stosować u pacjentów z potwierdzoną w przeprowadzonym wywiadzie reakcją na żywice metakrylanowe.

### Przechowywanie:

Nie przechowuj w temperaturze powyżej 25° C. Unikaj bezpośredniego działania światła. Zamykać strzykawkę po każdorazowym użyciu. Przed użyciem materiał powinien osiągnąć temperaturę pokojową. Po zakończeniu pracy odciągnąć delikatnie tłoczek strzykawki w celu uniknięcia zablokowania otworu. Nie stosować po upływie terminu ważności (patrz etykieta na strzykawce). Do użytku tylko w gabinecie dentystycznym.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Produkt może być stosowany tylko zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenia spowodowane niepoprawnym obchodzeniem się z materiałem lub nieodpowiednim jego przechowywaniem.